

Montagehandleiding – Eindbeugel voor de lattenbodem

Stap 1

Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. U heeft per lattenbodem één eindbeugel nodig.

Stap 2

Zorg ervoor dat de lattenbodem in het ledikant ligt of dat de lattenbodem horizontaal staat en is voorzien van een potenset.

Stap 3

Schuif de metalen eindbeugel over de dwarsbalk aan het voeteneinde van de lattenbodem.

Let op! De metalen eindbeugel mag niet over één van de latten van de lattenbodem worden geschoven.

Stap 4

Plaats de matras op de lattenbodem en schuif de matras aan zodat de matras vastgezet wordt door de eindbeugel.

Heeft u nog vragen over de montage van de eindbeugel? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice op 030-2040608 (NL) of 03 2896841 (BE).